


卡尤迪闪测™

本产品兼容卡尤迪闪测全自动
核酸检测机器人家族产品：
FlashDetect™ Robo
FlashDetect™ Flash10

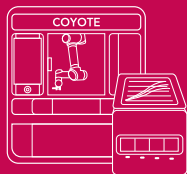

COYOTE® FlashDetect™

闪测小闪舱

国械注准20233400584

新型冠状病毒2019-nCoV和甲型乙型流感病毒核酸联合检测试剂盒(荧光PCR法)

真正的分子POCT解决方案，提供精确诊断和现场诊断，使患者得到快速精准治疗。

全集成一体化检测试剂盒 样本进、结果出

- **全集成**：集试剂配制、核酸提取、RT-PCR扩增、靶标检测于一体
- **极致快速**：25分钟内即出结果
- **准确可靠**：自带内部质控品
- **全封闭**：安全无污染
- **突破技术**：冻干试剂预分装，可室温储存和运输
- **高适配性**：适配通用病毒保存液

适用于全自动POCT核酸检测系统 FlashDetect Robo以及Flash10

- **全自动**：试剂配制、样品制备+核酸提取+扩增
- **独立模块**：随来随检，可同时检测不同项目
- **全封闭**：尽量减少污染风险
- **易操作**：减少实际操作时间和操作成本
- **占地空间小**
- **直观的用户操作界面**

技术参数

检测方法	荧光PCR法(集试剂配制、核酸提取、RT-PCR扩增、靶标检测于一体的检测盒,检测盒内预装有磁珠、裂解液、漂洗液、复溶缓冲液及冻干检测试剂,从而实现在一个封闭式耗材内完成核酸检测全流程。)			
基因靶点	2019-nCoV、流感A、流感B、RNP IC基因			
荧光通道	FAM	ROX	HEX	CY5
	FluA	FluB	2019-nCoV	RNaseP
检测限	100 copies/mL (2019-nCoV); 500 copies/mL (FluA/FluB)			
检测时间	≤ 25分钟			
样本类型	咽拭子			
储存温度	常温(2~28°C)保存			



工作流程

1 两种方式采集样本



2 扫描卡盒二维码



3 插入卡盒开始测试



4 结果判读



临床试验数据

		对照试剂检测结果*		
		阳性	阴性	总计
卡尤迪试剂检测结果 甲型流感病毒	阳性	214	0	214
	阴性	0	997	997
	总计	214	997	1211
灵敏度		100% (214/214, 95%CI: 98.61%~100%)		
特异性		100% (997/997, 95%CI: 99.70%~100%)		

		对照试剂检测结果*		
		阳性	阴性	总计
卡尤迪试剂检测结果 乙型流感病毒	阳性	218	0	218
	阴性	0	993	993
	总计	218	993	1211
灵敏度		100% (218/218, 95%CI: 98.64%~100%)		
特异性		100% (993/993, 95%CI: 99.70%~100%)		

*NMPA临床试验的样本类型为咽拭子。

订购信息

试剂			
规格	区别	包装规格	货号
规格A	内含病毒保存液	8人份/盒	6018006301
		24人份/盒	6018006302
		48人份/盒	6018006303
规格B	无病毒保存液	8人份/盒	6018006304
		24人份/盒	6018006305
		48人份/盒	6018006306

仪器		
型号	通道数量	尺寸(长×宽×高)
FlashDetect™ Flash10	4	42.3 × 28.6 × 35.7 cm
FlashDetect™ Robo	16/32	176 × 95 × 189 cm

北京卡尤迪生物科技股份有限公司

地址: 北京市海淀区中关村翠湖科技园云中心3号院22号楼 电话: 400-807-3999
网址: www.coyotebio.com

 **COYOTE**
让每一个人都受益于分子诊断