

卡尤迪闪测™

本产品的规格 A 试剂适用于 Gentier 48E 和 ABI7500 等实时荧光定量 PCR 仪。

规格 B 试剂适用于卡尤迪闪测 Flash20 实时荧光定量 PCR 仪及其矩阵。

规格 C 试剂适用于卡尤迪闪测 Flash10&Nano&Robo 系列全自动核酸检测分析系统。



版本号:RD-MP&RSV-2024-V1

COYOTE® FlashDetect™

卡尤迪闪测

呼吸道合胞病毒、肺炎支原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

产品参数

检测方法：荧光定量PCR法

检测靶标：肺炎支原体的repMp1基因、呼吸道合胞病毒的M基因

检测限：500 copies/mL

内标体系：内源性内标，可以质控采样和检测全流程，避免假阴性

样本类型：口咽拭子

储存条件：-20±5℃避光储存

注册证编号：国械注准20243400679



A/B 规格



C 规格

高通量检测方案

产品特点

A 规格试剂

专利技术：分子并行反应技术
准确可靠：自带内部质控品
检测时间：ABI 7500：60 分钟
Gentier 48E：48 分钟

工作流程



样本处理与加样
约 5分钟 即可完成



Gentier 48E
实时荧光定量PCR仪

核酸快速检测方案

产品特点

B 规格试剂

检测时间：30 分钟
专利技术：分子并行反应技术
极致快速：搭配 Flash20 可实现 1 分钟加样
准确可靠：自带内部质控品
安 全：反应过程封闭，生物安全风险低
灵活应用：随到随检，立等可取
矩阵模式：1-32 个样本量，单样本均 30 分钟出结果

工作流程



样本处理与加样
约 1分钟 即可完成



Flash20实时荧光定量PCR仪及矩阵

分子POCT检测方案

产品特点

C 规格试剂

检测时间：26 分钟
全 集 成：集试剂配制、核酸提取（磁珠法）、RT-PCR 扩增、
靶标检测于一体
准确可靠：自带内部质控品
全 封 闭：样本到结果，全流程封闭，防泄漏
灵活应用：随到随检，立等可取
矩阵模式：1-40 个样本量，单样本均 26 分钟出结果

工作流程



Flash10全自动核酸检测分析仪及矩阵

订购信息

规格	适配机型	包装规格	货号
A试剂	适用于Gentier 48E、ABI7500、BIO-RAD CFX96等 荧光定量PCR仪	24 人份/盒	6018003101
		48 人份/盒	6018003102
		96 人份/盒	6018003103
B试剂	适用于COYOTE®Flash20及Flash20矩阵	24 人份/盒	6018006701
		48 人份/盒	6018006702
		96 人份/盒	6018006703
C试剂	适用于COYOTE®Flash10及Flash10矩阵, Nano, Robo等	24 人份/盒	6018006704
		48 人份/盒	6018006705
		96 人份/盒	6018006706

北京卡尤迪生物科技股份有限公司

地址：北京市海淀区中关村翠湖科技园云中心3号院22号楼 电话：400-807-3999
网址：www.coyotebio.com

 **COYOTE**
让每一个人都受益于分子诊断