

COYOTE® FlashDetect™

卡尤迪闪测

甲、乙型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)

产品参数

检测方法: 荧光定量PCR法

检测靶标: 甲型流感病毒的M基因、乙型流感病毒的NS1基因

检测限: 500 copies/mL

内标体系:内源性内标,可以质控采样和检测全流程,避免假阴性

样本类型: 口咽拭子

储存条件: -20±5℃避光储存

注册证编号: 国械注准20223401174









C规格



高通量检测方案

产品特点

A 规格试剂

专利技术:分子并行反应技术 准确可靠:自带内部质控品 检测时间:ABI7500: 60分钟

Gentier 48E: 48 分钟

工作流程





核酸快速检测方案

产品特点

B 规格试剂

检测时间:30分钟

专利技术:分子并行反应技术

极致快速: 搭配 Flash20 可实现 1 分钟加样

准确可靠:自带内部质控品

安 全:反应过程封闭,生物安全风险低

灵活应用:随到随检,立等可取

矩阵模式:1-32个样本量,单样本均30分钟出结果

工作流程





Flash20实时荧光定量PCR仪及矩阵

分子POCT检测方案

产品特点

C 规格试剂

检测时间:26分钟

全 集 成:集试剂配制、核酸提取(磁珠法)、RT-PCR扩增、

靶标检测于一体 准确可靠:自带内部质控品

全 封 闭:样本到结果,全流程封闭,防泄漏

灵活应用:随到随检,立等可取

矩阵模式:1-40个样本量,单样本均26分钟出结果



Flash10全自动核酸检测分析仪及矩阵

订购信息

规格	适配机型	包装规格	货号
A试剂	适用于Gentier 48E、ABI7500、BIO-RAD CFX96等 荧光定量PCR仪	24 人份/盒	6018003002
		48 人份/盒	6018003001
		96 人份/盒	6018003003
B试剂	适用于COYOTE®Flash20及Flash20矩阵	24 人份/盒	6018006601
		48 人份/盒	6018006602
		96 人份/盒	6018006603
C试剂	适用于COYOTE®Flash10及Flash10矩阵,Nano,Robo等	24 人份/盒	6018006604
		48 人份/盒	6018006605
		96 人份/盒	6018006606

北京卡尤迪生物科技股份有限公司

地址: 北京市海淀区中关村翠湖科技园云中心3号院22号楼 电话: 400-807-3999

网址: www.coyotebio.com

